



Procedura pubblicazione caso clinico su WEBPORTAL

ULSS 14 Chioggia

Progetto E-Cardionet


Il presente documento ha lo scopo di fornire una mini guida all'utente per pubblicare un caso clinico sul portale web del progetto E-Cardionet.

Pubblicazione delle conclusioni del referto

Per aprire un caso sul portale web bisogna cliccare sul bottone **Autorizzazioni/Oscureamento** nel menu in alto.



Deselezionare la checkbox **Consenso al popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico**

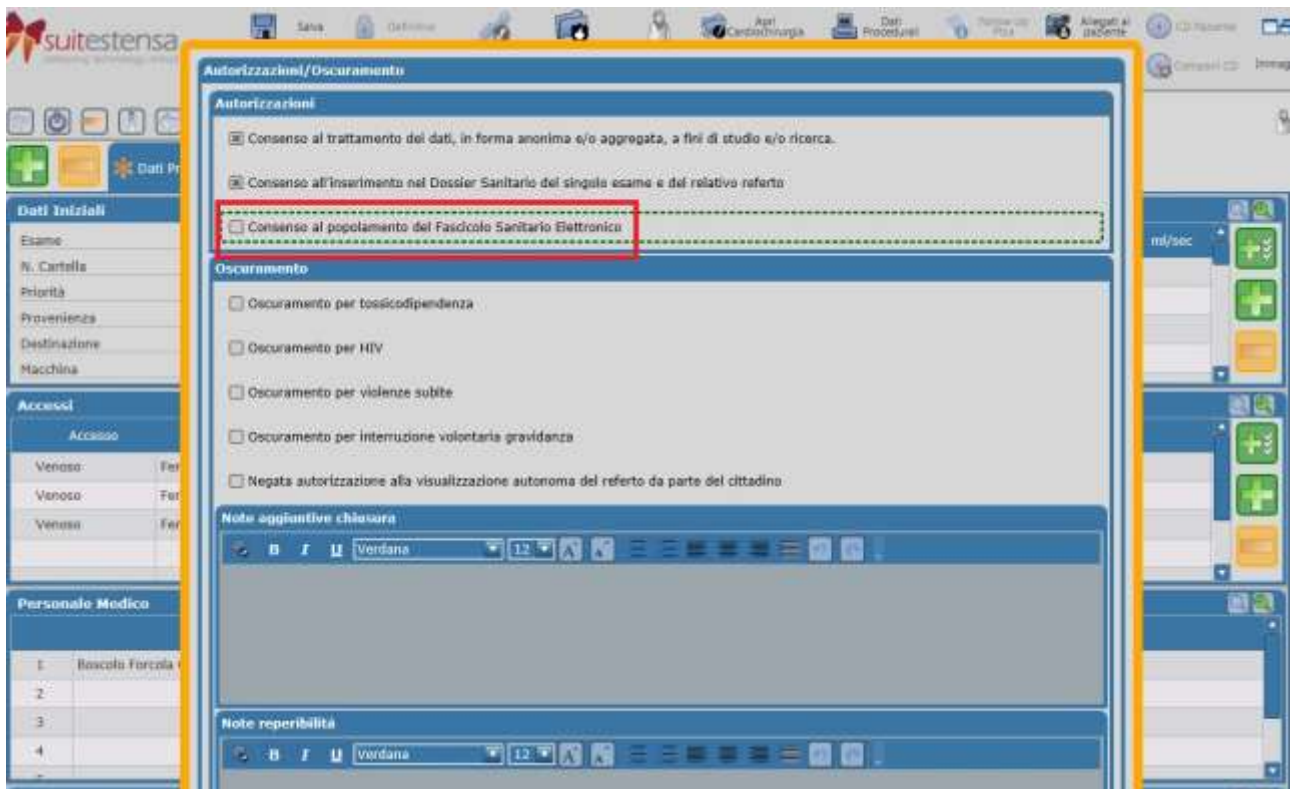

A questo punto al momento della resa definitiva del referto verrà creato il caso sul portale web, inserendo le conclusioni del referto.

Visualizzazione delle immagini anonimizzate

Per inviare le immagini al PACS scientifico bisogna cliccare su **Altre Funzionalità** e cliccare su **Esportazione su Server**.



Cliccare sulla checkbox **Abilitazione dell'anonimizzazione delle immagini** e inserire nel box **Accession Number** visibile in alto a destra.

016

Poscolo Forcola Gabriele (DR.)
Accession Number: EXCE633

Copia immagini

Selezione del server su cui inviare una copia delle immagini:

- Client di Estensa sul server APP/DPACS
[ESTENSACLIENT->DICOMEDPACS@10.10.16.118:1104]
- Client di Estensa sul server APP/Pacs Scientifico
[ESTENSACLIENT->SCIENCEPACS@10.10.16.117:1104]
- WADO/DPACS
[WADO->DICOMEDPACS@10.10.16.118:1104]
- MPS/DPACS
[MPS->DICOMEDPACS@10.10.16.118:1104]

1/1 oggetti anonimizzabili. Annulla

☒ Abilitazione dell'anonimizzazione delle immagini.

☒ Basic Profile

☒ Retain U I Ds

☒ Retain Device Identity

☒ Retain Patient Characteristics

☒ Retain Longitudinal Temporal Information


Accession Number: EXCE633

Content Creator Name: _____

Contrast Bolus Agent: _____

Im#: 1

A questo punto per inviare lo studio al PACS scientifico cliccare su **Client di Estensa sul server APP/Pacs Scientifico**.

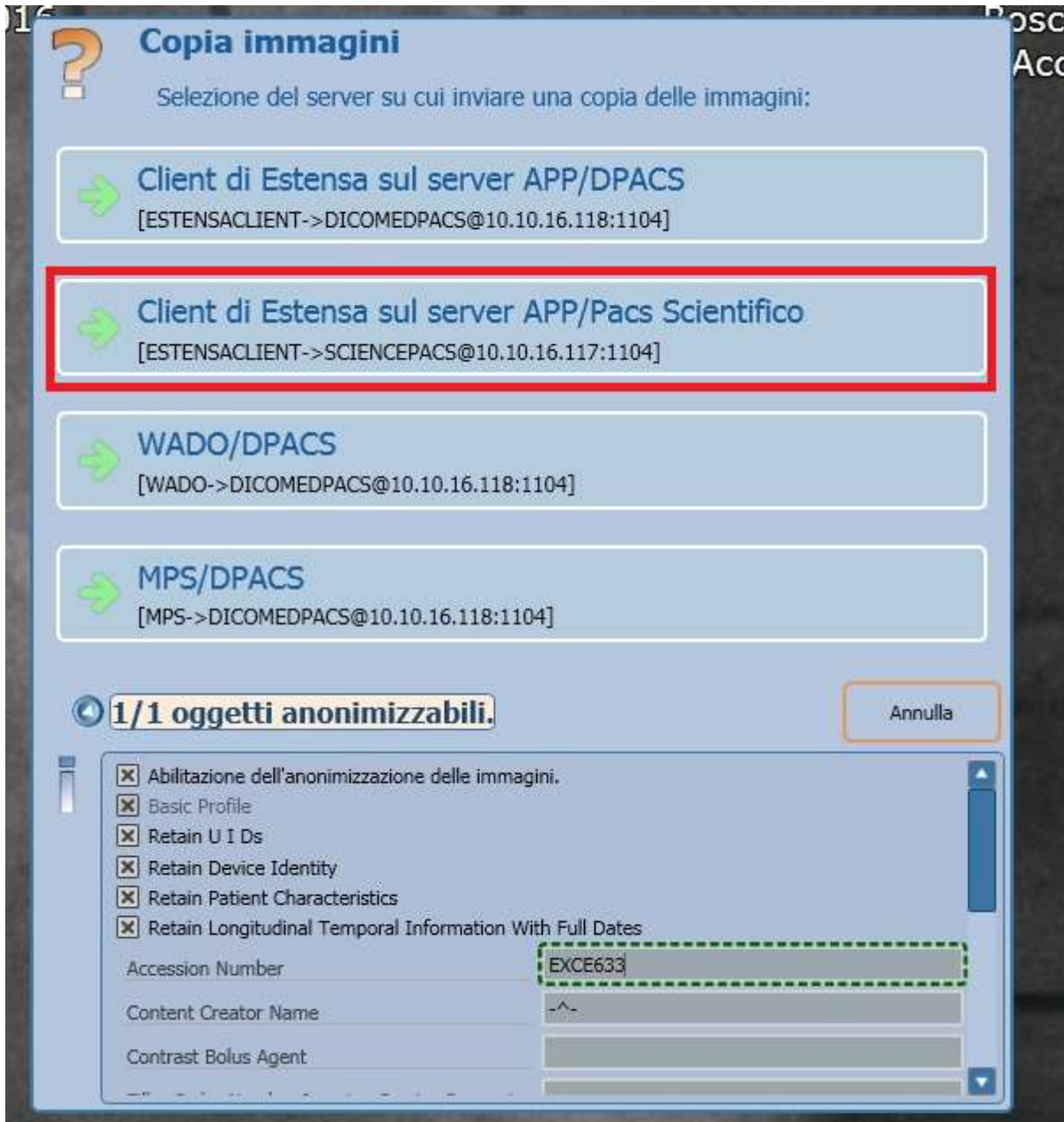

Copia immagini

Selezione del server su cui inviare una copia delle immagini:

- Client di Estensa sul server APP/DPACS
[ESTENSACLIENT->DICOMEDPACS@10.10.16.118:1104]
- Client di Estensa sul server APP/Pacs Scientifico**
[ESTENSACLIENT->SCIENCEPACS@10.10.16.117:1104]
- WADO/DPACS
[WADO->DICOMEDPACS@10.10.16.118:1104]
- MPS/DPACS
[MPS->DICOMEDPACS@10.10.16.118:1104]

1/1 oggetti anonimizzabili. Annulla

☒ Abilitazione dell'anonimizzazione delle immagini.

☒ Basic Profile

☒ Retain U I Ds

☒ Retain Device Identity

☒ Retain Patient Characteristics

☒ Retain Longitudinal Temporal Information With Full Dates

Accession Number: EXCE633

Content Creator Name: ~

Contrast Bolus Agent: